

INSTRUCTION MANUAL

ELOFLEX R

BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING

OHJEKIRJA

MANUALE DI ISTRUZIONI

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

Benvenuti nella vostra Eloflex

Grazie per aver scelto Eloflex come carrozzina elettrica. Siamo lieti che abbiate scelto Eloflex, perché la nostra missione è semplificare la vita quotidiana e migliorare la libertà delle persone con difficoltà motorie. Ci auguriamo che la vostra Eloflex vi permetta di godere di entrambi i vantaggi.

L'utilizzo della nuova carrozzina dovrebbe essere un'esperienza gratificante. Questo manuale contiene informazioni fondamentali sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione. Si consiglia vivamente di leggere l'intero documento prima di utilizzare Eloflex per la prima volta. È inoltre consigliabile esercitarsi nell'uso di Eloflex in uno spazio tranquillo, aperto e pianeggiante prima di avventurarsi in altri ambienti.

Siamo a vostra disposizione per sostenervi nell'utilizzo del vostro Eloflex. Se avete domande o bisogno di assistenza, non esitate a contattarci.

Buona fortuna e buon divertimento con il vostro Eloflex. Guidate con prudenza!

Contenuto	Pagina
Uso previsto	3
Svolgimento e piegatura	4
Dispositivo antibalzo	4
Istruzioni per la ricarica	5
Installazione del joystick	5
Utilizzo del joystick	6
Funzioni aggiuntive	7
Guida manuale	7
Poggiapiedi	8
Schiena	8
Sollevarli i braccioli	9
Trasporto e stoccaggio	9
Guida	10
La sicurezza	11
Specifiche tecniche	12
Contattare	12



Uso previsto

Classificazione e destinazione d'uso

Le sedie a rotelle elettriche Eloflex sono state sviluppate per le persone che hanno difficoltà a camminare o che non possono camminare affatto, ma che hanno la capacità visiva, fisica e mentale di controllare una sedia a rotelle elettrica.

La carrozzina elettrica Eloflex è sufficientemente compatta e flessibile per l'uso in interni, ma è adatta anche per l'uso all'aperto. Il capitolo "Dati tecnici" sul retro di questo documento contiene informazioni su velocità, raggio di sterzata, autonomia, capacità massima di sollevamento, peso massimo dell'utente, ecc.

Eloflex è testato e approvato secondo la norma EN12184:2014 - Classe B (uso interno ed esterno). Eloflex è anche approvato secondo le norme ISO-7176, IEC60601 e le batterie sono approvate secondo la norma UN38.3.

Le carrozzine elettriche Eloflex soddisfano i requisiti applicabili della direttiva MDR 2017/745.

La valutazione di conformità MDR Classe 1/marcatura CE è stata rilasciata in conformità all'articolo 19 e agli allegati II e III della MDR 2017/745. Il marchio CE decade se si utilizzano componenti o accessori sostitutivi non approvati per questo prodotto.

Esigenze

Lo scopo di una sedia a rotelle elettrica Eloflex è quello di compensare una lesione o una disabilità ed è consigliata nelle seguenti circostanze:

- Se l'utente non è in grado di camminare o ha una capacità di camminare molto limitata, che rende difficile muoversi all'interno della propria abitazione.
- Se è necessario uscire di casa per recarsi in luoghi frequentati abitualmente per le attività quotidiane.
- Quando l'utente ha difficoltà a raggiungere o svolgere lavori o attività a causa di disabilità motorie.

È consigliabile utilizzare le sedie a rotelle elettriche Eloflex sia all'interno che all'esterno se, a causa di problemi di mobilità, non è possibile utilizzare sedie a rotelle azionate a mano, ma è comunque possibile maneggiare correttamente le sedie a rotelle elettriche.

Gli accessori

Il caricabatterie, i catarifrangenti e una borsa con semplici attrezzi sono contenuti nella borsa di stoccaggio sotto il sedile al momento della consegna.

Utilità

Utilizzate la sedia a rotelle Eloflex solo quando è perfettamente funzionante, altrimenti metterete a rischio voi stessi e gli altri. Il seguente elenco non comprende tutte le situazioni possibili, ma descrive alcune condizioni che possono compromettere l'utilizzabilità della carrozzina:

- Non utilizzare la carrozzina se le batterie sono difettose o deformate.
- Non utilizzare la carrozzina se il motore va a scatti o emette rumori anomali.
- Non utilizzare la carrozzina se il funzionamento dei freni sembra difettoso.
- Se i pneumatici sono usurati, rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.
- Se si notano danni alla cintura di sicurezza, al bracciolo, al sedile, allo schienale, al joystick o ad altre parti della sedia, rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.
- Se si notano danni all'impianto elettrico (cavi, batterie, caricabatterie, ecc.), rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.

Garanzia del produttore

La garanzia Eloflex copre la sostituzione delle parti rotte, a condizione che il danno non sia stato causato dall'utente. La garanzia non copre i danni derivanti da circostanze esterne quali furto, abuso, uso improprio, fulmini o modifiche.

Durata di vita

La durata stimata di un Eloflex è di 5 anni. Tuttavia, la durata del prodotto è fortemente influenzata dalle modalità di utilizzo e manutenzione. Un Eloflex può durare molto più a lungo se viene curato e utilizzato secondo le informazioni fornite in questo documento.

Norme di sicurezza e rischi


L'UTENTE DEVE LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI GUIDA CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI UTILIZZARE LE CARROZZINE ELOFLEX.

Svolgimento e piegatura

Svolgimento

Fase 1

Posizionare la sedia piegata a terra come mostrato a destra. Sbloccare il blocco di trasporto situato sul retro dello schienale. Afferrare lo schienale e tirarlo verso l'alto per aprire la sedia. Con l'altra mano, spingere il sedile verso il basso fino a sentire un chiaro "clic", che indica che il blocco di sicurezza è inserito.

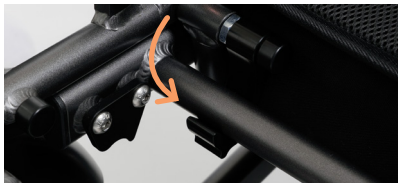

Fase 2

Importante! Assicurarsi che la chiusura sia completamente chiusa per bloccare la sedia in posizione aperta.



Controllare il blocco prima dell'uso.

Piegare

Fase 1

Premere il pulsante rosso per sbloccare la chiusura principale, come mostrato nell'immagine.



Fase 2


Appoggiare una mano sulla parte anteriore del cuscino del sedile. Con l'altra mano, afferrare la parte superiore dello schienale e piegarlo in avanti. Spingere la sedia come mostrato nella figura.



Punti di pizzico! Fare attenzione quando si piega.

Fase 3

Per mantenere la carrozzina in posizione ripiegata, è possibile inserire un pratico blocco per il trasporto. Ruotare il blocco di trasporto fino a bloccare l'asta opposta.

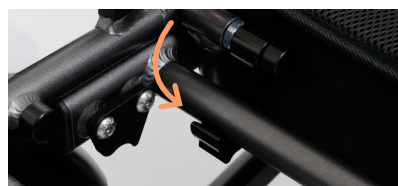

Dispositivo antiribaltamento

Far scorrere il pulsante rosso e ripiegare l'antiribaltamento verso l'alto per farlo rientrare. Il dispositivo antiribaltamento non deve essere regolato, ma può essere ritratto per il trasporto su alcuni modelli. La carrozzina non deve essere utilizzata senza il dispositivo antiribaltamento attivo, poiché ciò comporta il rischio di gravi lesioni. Controllarlo prima di ogni utilizzo.



Rischio di lesioni!
Assicurarsi sempre che il dispositivo antiribaltamento sia attivo.

Istruzioni per la ricarica

Prima di iniziare

- Caricare il dispositivo Eloflex al momento della consegna.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito con l'Eloflex.
- Il caricabatterie è progettato per essere collegato solo al joystick e non direttamente alle batterie.
- Caricare almeno ogni 3 mesi per evitare danni permanenti alle batterie.

Come caricare

Cercate di caricare il vostro Eloflex dopo ogni corsa o quando l'indicatore della batteria sul joystick scende di tre linee.

Iniziare spegnendo l'Eloflex (tutte le luci sul joystick devono essere spente).

Collegare il caricabatterie alla presa sulla parte anteriore del joystick. Assicurarsi che i contatti coincidano.

Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie a una presa di corrente. La carica è indicata da una spia sul caricatore. Una luce rossa indica che la

carica è in corso.

Dopo circa tre ore, le batterie sono cariche al 90% e la sedia può essere utilizzata.

Dopo circa 5-8 ore, la spia del caricatore diventa verde, indicando che le batterie sono completamente cariche. Durante la carica, il caricabatterie si riscalda, il che è normale.

Al termine della carica, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente e dalla sedia a rotelle. Non caricare mai senza sorveglianza. Le batterie possono essere caricate fino a 0 gradi. Quando si caricano a temperature inferiori, le batterie potrebbero non caricarsi completamente.



La mancata ricarica regolare delle batterie può causare danni permanenti



Eloflex viene utilizzato a temperature inferiori allo zero, l'autonomia ne risente. Ad esempio, a -10 gradi, l'autonomia può ridursi fino al 50%.

Conservazione a lungo termine

Le batterie possono subire danni permanenti se la tensione scende troppo.

Si consiglia di scollegare le batterie per ridurre al minimo la scarica e di ricaricarle regolarmente (almeno una volta ogni 3 mesi).

Non lasciare mai il caricabatterie permanentemente collegato.

Installazione del joystick

Fase 1

Montare il joystick montando la chiusura rapida sul bracciolo con il fermo rivolto verso l'esterno. Regolare il dado in modo che la chiusura possa essere completamente chiusa, pur mantenendo saldamente il joystick in posizione. Il joystick può essere montato sul lato destro o sinistro.




Fase 2

Collegare i connettori dei cavi e ruotarli con attenzione finché i perni non si inseriscono nei fori e le scanalature di entrambi i connettori non coincidono. Quindi, avvitare saldamente i manicotti su ciascun punto di connessione.



Fare attenzione a non danneggiare o piegare i pin del connettore.

Utilizzo del joystick

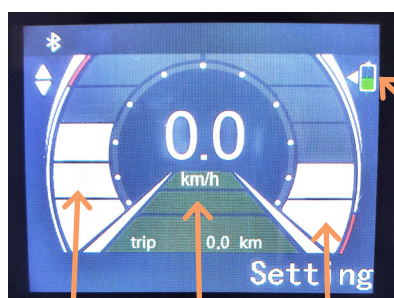

1

2

3

4

1 Tachimetro: Visualizza la velocità attuale.

2 Impostazione della velocità: Mostra la distanza percorsa e la velocità attuale.

3 Contachilometri parziale/ ODO: Visualizza la distanza percorsa dall'ultima accensione (trip) o la distanza totale del veicolo (ODO).

4 Livello della batteria: Indica l'energia residua delle batterie. Quando sono completamente cariche, tutte le barre sono bianche. Si consiglia di ricaricare quando sono state utilizzate tre barre.

Connettore USB

SUGGERIMENTO: utilizzare il connettore USB sotto il joystick per caricare il telefono cellulare.




Ingresso caricabatterie

Luce



Joystick: Controlla la velocità e la direzione della sedia.

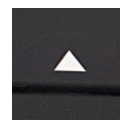

Aumenta la velocità: Premere per far andare la sedia più veloce.



Accensione e spegnimento: Premere per accendere o spegnere Eloflex.



Ridurre la velocità: Premere per rallentare la sedia.



Clacson: Premere per emettere un segnale acustico di attenzione.



Accensione/spegnimento della luce: Premere per accendere o spegnere la luce.

Funzioni aggiuntive


Regolazione delle impostazioni

È possibile modificare le impostazioni della poltrona, tra cui la lingua, il volume dell'avvisatore acustico e le unità di misura.


1. Per accedere alle impostazioni, premere il pulsante multifunzione destro. Viene visualizzato un elenco di opzioni.



2. Utilizzare i pulsanti di velocità per scorrere l'elenco delle opzioni verso l'alto e verso il basso.

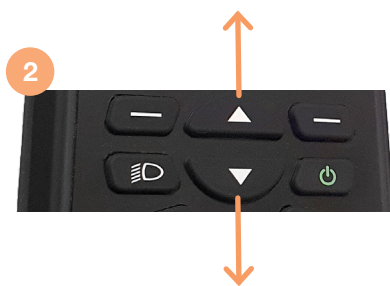

3. Selezionare una funzione premendo il pulsante multifunzione destro (Invio) o tornare indietro di un passo premendo il pulsante multifunzione sinistro (Ritorno).

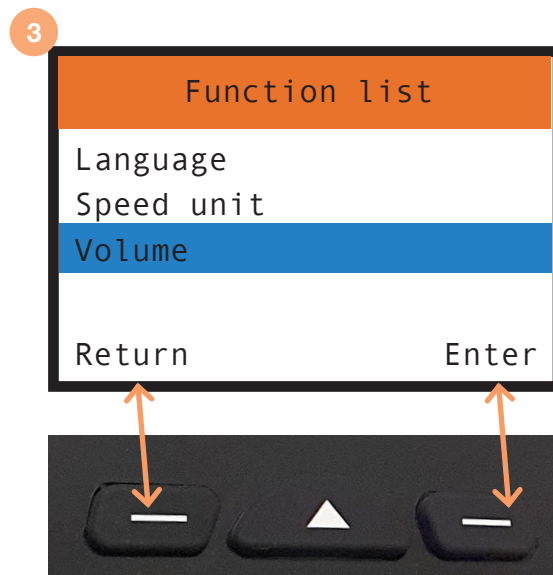

Blocco / Sicurezza bambini

È possibile bloccare elettronicamente l'Eloflex premendo contemporaneamente le frecce su e giù per 3 secondi. Un piccolo simbolo nella parte superiore del display indicherà che il blocco è attivato. (Il joystick deve essere acceso per bloccare/sbloccare).

Porta di ricarica USB

La porta USB può caricare telefoni cellulari, iPad e altri dispositivi portatili. Fornisce un'alimentazione di 5 V con una corrente di carica determinata dal

dispositivo collegato, fino a un massimo di 2,1A.

Avvertenze

Il display è in grado di visualizzare i codici di guasto per indicare gli errori. I codici di errore 1 e 2 indicano che i freni magnetici sono attivi.

Controllo remoto tramite app

La carrozzina Eloflex può essere controllata tramite un'app. Per scaricarla, utilizzare i codici QR riportati di seguito. Se necessario, contattare il concessionario per istruzioni dettagliate. NOTA: il controllo tramite app non deve essere utilizzato come dispositivo di controllo assistito (ad esempio, quando una persona è seduta sulla sedia).



Guida manuale

Spegnere la carrozzina con il joystick. Spingere quindi le leve rosse sui motori (vedi figura) per scollegare i freni magnetici. In questa posizione, la sedia può essere fatta rotolare manualmente.

Nota! Se l'utente utilizza la sedia senza assistenza, il blocco magnetico della sedia deve essere sempre inserito.



Non spingere le leve rosse con i piedi, ma solo con le mani.

Poggiapiedi


Per facilitare l'ingresso e l'uscita, il poggiapiedi può essere ripiegato verso l'alto e verso l'interno, come illustrato di seguito.



Regolazione del poggiapiedi

Il poggiapiedi può essere regolato verticalmente e orizzontalmente in posizioni fisse. Allentare il bullone, spostare il poggiapiedi nella posizione desiderata e stringere delicatamente il bullone, assicurandosi che sia allineato con il foro filettato. Serrare il bullone.

Se il poggiapiedi non rimane in posizione sollevata, è possibile regolare l'inerzia del poggiapiedi stringendo le viti di fissaggio.

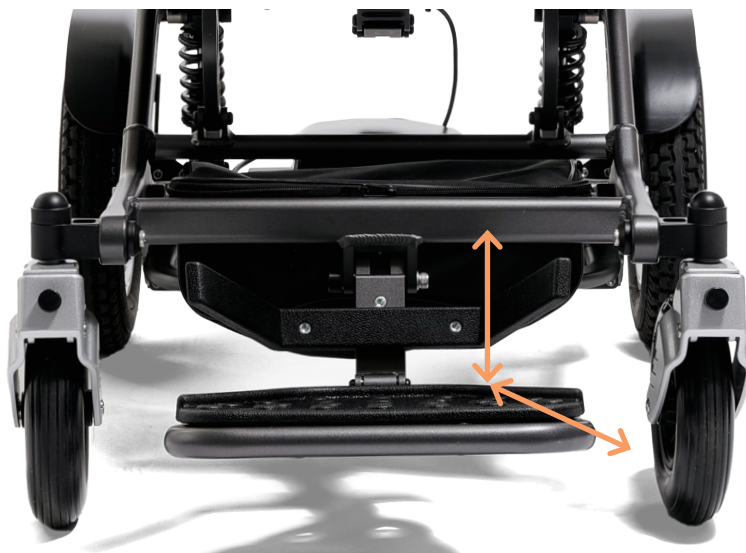

Schienale


Regolazione dello schienale

Per regolare l'inclinazione dello schienale, premere le leve sui lati e posizionare lo schienale in una posizione angolata che risulti comoda. È possibile scegliere tra un'angolazione di 8-30 gradi.



Solleverre i braccioli

Per sollevare il bracciolo, è sufficiente spingere la piccola maniglia rossa di rilascio sotto il bracciolo. Una volta ripiegato, il bracciolo si blocca automaticamente.

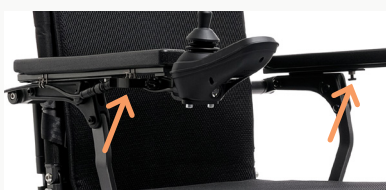

Trasporto e stoccaggio

- Per sollevare la sedia, si consiglia di piegarla prima in posizione orizzontale, poi di sollevarla in posizione verticale e infine di sollevarla.
- Una sedia piegata può essere riposta nel bagaglio di un'auto o in un armadio.
- Durante il trasporto, ripiegare o rimuovere il joystick.
- Se la poltrona non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, assicurarsi che sia conservata correttamente e che le batterie siano caricate periodicamente come indicato nel capitolo "Come si carica". In caso contrario, la sedia potrebbe diventare inutilizzabile.

- La poltrona deve essere conservata in ambienti chiusi, al riparo dal gelo, asciutti e ventilati. Temperatura di stoccaggio 0-30 gradi.
- I cuscini sono sfoderabili e lavabili a 40° C.
- In caso di trasporto in autobus o con mezzi di trasporto per disabili, Eloflex deve essere fissato ai punti di fissaggio indicati nelle immagini in basso. **Nota! Eloflex non è testato o approvato come seggiolino auto. Pertanto non è consentito far sedere il bambino su Eloflex durante il trasporto in auto.**
- In caso di trasporto in aereo, si prega di confermare con la propria compagnia aerea prima della prenotazione e del check-in. Eloflex segue le raccomandazioni della IATA.



Guida

Leggere

L'utente deve leggere queste istruzioni di sicurezza e di guida prima di utilizzare la carrozzina Eloflex.

Pratica

La pratica rende perfetti. Allenatevi a guidare Eloflex insieme a un assistente iniziando su una superficie aperta, preferibilmente all'aperto, prima di utilizzare la sedia a rotelle tra altre persone, in negozi o ristoranti, ecc. Avanzare muovendo lentamente il joystick. Fermarsi rilasciando il joystick.

Invertire

Fare retromarcia muovendo lentamente il joystick all'indietro. Per fermarsi, rilasciare il joystick. Ricordate di guardare sempre all'indietro prima di iniziare la retromarcia per assicurarvi che non ci siano persone o cose in mezzo.

Girare

Fate girare il joystick muovendolo delicatamente di lato. Fare attenzione a non intralciare i lati durante la rotazione.

Girare

Girare mentre si guida muovendo delicatamente il joystick lateralmente nella stessa direzione in cui si vuole girare. Ridurre sempre la velocità quando si gira.

Ostacoli

Esercitarsi a evitare e superare gli ostacoli. Muovete il joystick lateralmente mentre guidate in avanti per evitare gli ostacoli. Ricordarsi di ridurre la velocità quando ci si avvicina agli ostacoli.

Guida veloce

Guida veloce: Premete il joystick in avanti se volete guidare velocemente. Ricordate di ritirare il joystick e di ridurre la velocità non appena vi sentite insicuri, sia che stiate girando sia che vi stiate avvicinando a un ostacolo. svolta o l'avvicinamento a un ostacolo

Superare gli ostacoli

Avvicinarsi lentamente all'ostacolo e assicurarsi che le ruote anteriori siano nella direzione di marcia. Quindi spostare lentamente il joystick in avanti, piegandosi all'indietro, per superare gli ostacoli Eloflex è testato e approvato per ostacoli fino a un massimo di 6 cm.

Superfici in pendenza

Provate a guidare dritto verso l'alto o verso il basso su una superficie inclinata. Piegatevi leggermente in avanti quando salite e all'indietro quando scendete, per mantenere il centro di gravità. Se possibile, evitate di guidare lateralmente e compensate la pendenza laterale inclinandovi nella direzione opposta. Guidare sempre lentamente sui pendii e tenere presente che la distanza di arresto può essere significativamente maggiore rispetto al terreno pianeggiante. L'angolo di pendenza massimo consentito per questa carrozzina è di 9 gradi. Anche se la vostra Eloflex è in grado di farlo, evitate di guidare su pendenze superiori all'angolo di prova richiesto per il rischio di gravi lesioni in caso di ribaltamento.

Ascensori

Ricordate di controllare la larghezza della porta dell'ascensore e la velocità di chiusura della porta prima di entrare nell'ascensore. Tenete presente che potreste essere costretti a fare retromarcia se l'ascensore non è abbastanza ampio da permettervi di girarvi.

Guida su strada

Con il vostro Eloflex guidate principalmente su marciapiedi, passaggi pedonali e piste ciclabili e, in ultima analisi, su strade trafficate.

Attraversare la carreggiata

Se possibile, scegliete sempre di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Prestare attenzione alle auto che si incrociano. Utilizzare la parte smussata del marciapiede, se disponibile. Evitare i cordoli più alti di 6 cm.

Pneumatici

Se la carrozzina è dotata di pneumatici ad aria, controllare regolarmente la pressione a 2,5 bar. In caso di foratura, astenersi dalla guida e rivolgersi al rivenditore o a un'officina specializzata per la riparazione.

Istruzioni di sicurezza per la guida

Il ribaltamento della carrozzina comporta il rischio di gravi lesioni.

- Guidare solo in pendenze che non superino l'angolo massimo specificato.
- Utilizzare sempre dispositivi antiribaltamento quando si viaggia con Eloflex.
- La guida in discesa deve essere sempre effettuata a velocità ridotta.
- Evitare le aree a rischio di superfici ghiacciate o scivolose.
- Non cercare mai di salire o scendere le scale con la sedia a rotelle.
- Non superare mai ostacoli di altezza superiore a quella massima consigliata.
- Evitare movimenti rapidi con il joystick e cambi improvvisi di direzione durante la guida.

Rischio di rimanere bloccati in luoghi remoti.

- Un utente con mobilità molto ridotta non dovrebbe percorrere da solo lunghe distanze all'aperto.

Rischio di lesioni se un piede scivola dalla pedana e cade sotto la carrozzina durante la guida.

- Durante la guida, posizionare sempre i piedi al centro della pedana.

Rischio di lesioni in caso di collisione con altri oggetti.

- Attraversare i passaggi stretti alla minima velocità e con la massima attenzione.
- Prestare particolare attenzione quando ci si avvicina o si guida in prossimità di tavoli a causa del rischio di schiacciamento tra il piano del tavolo e il joystick e/o il bracciolo.

Se i dispositivi antiribaltamento vengono rimossi, danneggiati o montati in una posizione diversa da quella standard, la carrozzina rischia di ribaltarsi.

- I dispositivi antiribaltamento devono essere sempre montati quando si utilizza la carrozzina.
- I dispositivi antiribaltamento funzionano solo su superfici solide. Su superfici morbide come prati e neve, il dispositivo antiribaltamento può perdere la sua efficacia. Pertanto, guidare
- con estrema cautela su superfici morbide.

Sospensione

Questa carrozzina è dotata di sospensioni a molla su tutte e quattro le ruote. Le molle sono pretensionate e non necessitano di essere regolate.



La sicurezza

Attraversamento dei binari ferroviari

Attraversate sempre i binari ferroviari in linea retta, mai in obliquo. Non attraversate mai i binari da soli, ma sempre con qualcuno che possa aiutarvi.

Spigoli vivi

Fate attenzione quando guidate su pendii ripidi, perché la sedia potrebbe rompersi. Eloflex è testato e approvato per pendenze con un massimo di 9 gradi. Avere sempre con sé qualcuno che possa aiutarvi.

Bordi alti

Fate attenzione quando salite o scendete da un bordo. Eloflex è testato e approvato per bordi fino a un massimo di 6 cm. È necessario avere sempre con sé qualcuno in grado di aiutarlo.

Trasferimento

Si consiglia di avere sempre con sé qualcuno che possa aiutarvi nei trasferimenti da e verso il vostro Eloflex. Spegnerne sempre l'alimentazione prima di iniziare il movimento. Sollevare sempre i braccioli e il poggiatesta prima di spostarsi per facilitare la salita e la discesa dalla poltrona.

Non riparare da soli

Non cercare mai di riparare da soli una sedia a rotelle rotta. Se si tenta di riparare la sedia da soli, la garanzia non è valida. Rivolgersi sempre a Eloflex o al negozio o al centro di assistenza che ha venduto/prescritto la sedia. Non modificare mai la carrozzina da soli.

Nessun giocattolo

Non permettere mai a bambini che non usano abitualmente una sedia a rotelle di sedersi o di usare Eloflex.

Pulizia

Non pulire mai Eloflex con acqua corrente. Pulirlo solo con un panno umido. Se Eloflex è lento a ripiegarsi, è possibile lubrificare le giunzioni con olio o spray al silicone.

Attenzione al calore

Non lasciate mai Eloflex alla luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore o a un fuoco aperto. Le batterie potrebbero danneggiarsi e alcune superfici

potrebbero surriscaldarsi a tal punto da rischiare di ferirsi. È possibile utilizzare Eloflex da -10 gradi a +45 gradi. A basse temperature l'autonomia di guida sarà compromessa. La carrozzina è resistente all'accensione secondo la norma EN 12184.

Conservazione

Tenere Eloflex fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato. La sedia deve essere conservata in ambienti chiusi, al riparo dal gelo, asciutti e ventilati. Temperatura di stoccaggio 0-30 gradi.

Il caricabatterie

Il caricabatterie non deve mai essere coperto quando viene utilizzato per caricare l'Eloflex. Il caricabatterie si surriscalda e c'è il rischio di incidenti o lesioni.

Batterie

Non conservare mai le batterie alla luce diretta del sole o in un luogo che possa raggiungere temperature inferiori allo zero. Le batterie devono essere conservate in un luogo asciutto e ventilato. In caso di smaltimento le batterie devono essere riciclate secondo i requisiti nazionali/locali. Come per tutti i prodotti a batteria, l'autonomia di guida diminuisce con il tempo, anche durante il periodo di garanzia e la durata del prodotto.

Utilizzo

La carrozzina elettrica Eloflex è stata progettata per soddisfare diverse esigenze. La decisione in merito alla sua idoneità per l'utente è presa congiuntamente dal coordinatore o dal rivenditore e dall'utente. Eloflex non si assume alcuna responsabilità se la carrozzina non è adattata alle esigenze dell'utente.

Modifiche

Eloflex deve essere utilizzato principalmente nella sua configurazione standard. Eventuali modifiche o regolazioni devono essere eseguite esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato o da Eloflex. I danni o i malfunzionamenti causati da modifiche non conformi alle istruzioni per l'uso o da una manutenzione inadeguata non sono coperti dalla garanzia.

Istruzioni generali di sicurezza

Se la carrozzina viene utilizzata per scopi diversi da quelli descritti nel presente documento, sussiste il rischio di lesioni personali.

- Utilizzare la sedia a rotelle solo secondo le istruzioni contenute nel presente manuale (vedere sopra, capitolo "Classificazione del tipo e uso previsto").
- Non utilizzare mai la sedia a rotelle mentre è trasportata in un altro veicolo (auto/bus).

Esiste il rischio di lesioni personali se la sedia a rotelle viene utilizzata con una capacità di guida ridotta.

- Non utilizzare la sedia a rotelle quando le proprie capacità di guida sono compromesse a causa, ad esempio, di malattie, farmaci o alcol.

C'è il rischio di lesioni se la sedia a rotelle viene spostata involontariamente.

- Spegnerne la sedia a rotelle prima di salire e scendere o se c'è il rischio che voi, un'altra persona o un oggetto possano entrare in contatto con il joystick.
- Quando i motori sono disinnestati, i freni non funzionano. Pertanto, la carrozzina deve essere spinta solo su terreni pianeggianti e mai su pendii. Non lasciare mai la carrozzina all'interno o in prossimità di pendii con i motori disinseriti.

Esiste il rischio di lesioni personali se la carrozzina viene spenta durante la marcia, ad esempio con il pulsante di accensione/ spegnimento o strappando un cavo, poiché si arresta con un forte scatto.

- Rilasciare il joystick quando si frena in caso di emergenza. La carrozzina si arresta automaticamente.

Esiste il rischio di lesioni dovute a cadute dalla carrozzina.

- Non spostarsi in avanti, non piegarsi in avanti tra le ginocchia e non sporgersi dal bordo della carrozzina, ad esempio per raggiungere degli oggetti.
- Si raccomanda di utilizzare sempre la cintura di sicurezza e di regolarla nuovamente prima di ogni viaggio.
- Durante il trasferimento tra sedili/veicoli, avvicinarsi il più possibile alla nuova posizione per ridurre al minimo lo spazio e il rischio di ribaltamento della carrozzina.

Il superamento del carico massimo consentito comporta il rischio di lesioni personali.

- Rispettare il carico massimo consentito (vedere il capitolo "Dati tecnici" sul retro di questo documento).
- La sedia a rotelle può essere utilizzata da una sola persona. Non utilizzare mai la carrozzina per trasportare più di una persona alla volta.

Il rischio di lesioni personali e di danni alla carrozzina sussiste se il blocco si sblocca quando la piegatura non è correttamente bloccata durante l'utilizzo della carrozzina.

- Se il blocco della sedia a rotelle non è scattato correttamente in posizione, la sedia può crollare improvvisamente durante l'uso, con il rischio di cadere dalla sedia.
- Assicurarsi sempre che il gancio di bloccaggio sia in posizione corretta prima di utilizzare la carrozzina.
- Quando si ripiega la sedia a rotelle c'è il rischio di lesioni personali e danni da schiacciamento.
- Ripiegare e sollevare sempre la carrozzina come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Prestare attenzione affinché nulla o quasi venga schiacciato durante le operazioni di ripiegamento e dispiegamento.

Se la sedia a rotelle viene utilizzata in ambienti umidi, sussiste il rischio di lesioni personali e di danni alla carrozzina.

- La sedia a rotelle non deve essere utilizzata durante la pioggia.
- La sedia a rotelle non deve essere utilizzata durante il bagno.
- Evitare di guidare in condizioni di pioggia per periodi prolungati.

EMC

- Esiste il rischio che la carrozzina possa disturbare o essere disturbata da apparecchiature a causa dei campi elettromagnetici. Ciò potrebbe influire sui comandi della carrozzina.
- Questo dispositivo è dotato di trasmettitore Bluetooth. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

Specifiche tecniche **R**

Peso netto	29 kg senza batterie
Peso totale	32,5 kg con batterie
Velocità	6,5 km/h
Gamma	30 km*
Durata	5 ore per carica
Motore	2 motori brushless ad alta potenza
Effetto del motore	2 x 250 Watt
Batteria	2 x litio ION 10 AH / 24 V (240 Wh) (+1 slot extra)
Peso della batteria	1,8 kg
Tempo di ricarica	3 ore
Raggio di sterzata	88 cm
Inclinazione massima	9 gradi statici, 6 gradi dinamici
Ruote	anteriore 8" (solide), posteriore 12" (aria) (2,5 bar)
Altezza del sedile	55 cm
Larghezza del sedile	43 cm
Profondità del sedile	43-48 cm
Peso massimo dell'utente	160 kg
Joystick	Montaggio a destra o a sinistra
Cuscino	Staccabile, copertura rimovibile
Schienale	8°- 30°
Dimensioni	102,5 cm (altezza) x 62 cm (larghezza) x 108,5 cm (profondità)
Dimensioni piegate	44 cm (altezza) x 62 cm (larghezza) x 89 (87**) cm (profondità)
Garanzia	2 anni
Ostacolo massimo	5 cm

* Distanza in condizioni ottimali e influenzata dalla temperatura, dallo stile di guida, dall'altitudine e dalle condizioni della batteria, ecc.

** Supporto per il polpaccio rimosso

© Copyright Eloflex

Questo documento contiene informazioni protette da copyright e non può essere copiato o riprodotto in tutto o in parte senza l'autorizzazione scritta di Eloflex. Eloflex non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici contenuti nel presente documento e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

Contattare Eloflex

In caso di domande, assistenza o informazioni su richiami di prodotti o avvisi di sicurezza, contattare il centro assistenza o la concessionaria locale. Se necessario, il numero di serie del prodotto è riportato su un adesivo situato sul lato inferiore del telaio.



Eloflex
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SWEDEN

+46 10-18 33 100
info@eloflex.eu
www.eloflex.it